

ClearView™

Calentador de endoscopio anticondensación

Evita la condensación del endoscopio



Simple

Precalienta el scopio a la temperatura cuerpo
Elimina la causa de la condensación

Seguro

Garantiza la visión endoscópica del cirujano
No necesita electricidad ni agua caliente

Rápido

Se activa con sólo pulsar el disco
Scopio está caliente su uso en unos minutos
Se acabó interrumpir para desempañar la lente

ClearView™ Calentador de endoscopio anticondensación,
En envase estéril para un solo uso;
10 uds por Caja, no. de pedido **31SW10**
30 uds. por Estude, no. de pedido **31SW30**

2MEDICAL-europe Países Bajos
www.2MEDICAL-europe.com
order@2medical-europe.com
Teléfono +31.6.22941261




ClearView™

Calentador de endoscopio
anticondensación

COLOQUE EL/LOS ENDOSCOPIO(S) EN
EL CALENTADOR



DOBLE EL DISCO DOS O TRES VECES

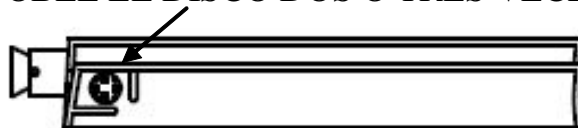

CALIENTE Y LISTO PARA SU USO EN
DOS MINUTOS

*Nota: encienda el calentador cinco minutos antes de
que vaya a necesitar el endoscopio.*

*ClearView™ se mantiene caliente hasta una hora.
Cúbralo con una toalla estéril para conservar la
esterilidad y mantener el calor.*

CE 0197
SIN LATEX
SIN DEHP
DE UN SOLO USO
PRODUCTO ESTÉRIL SALVO QUE EL
PAQUETE ESTÉ ABIERTO O DETERIORADO

Fecha de fabricación: figura en el precinto
Fecha de caducidad: tres años a partir de fabricación
Condiciones normales de almacenamiento:
nunca por debajo de los -2°C



MADE IN PRC FOR 2MEDICAL-EUROPE
Product no. 31SW01