

# ClearView™

Anti-Fog Scope Warmer

**Voorkomt Scope Condensatie**



**Simpel**

Verwarmt de scope tot lichaamstemperatuur

**Veilig**

Geen elektriciteit of warm water nodig

**Snel**


In enkele minuten gebruikswarme scopen

[www.2MEDICAL-europe.com](http://www.2MEDICAL-europe.com) The Netherlands




**ClearView™**  
Anti-Fog Scope Warmer

LEG DE SCOPE(N) IN DE WARMER

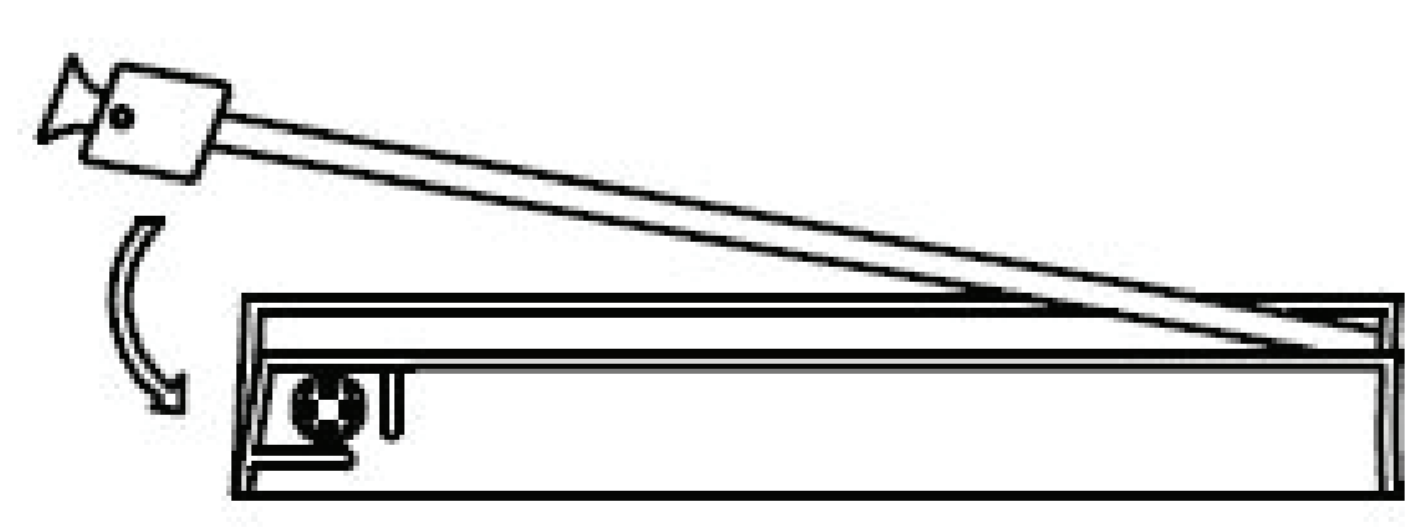

BUIG DE MUNT 2 OF 3 KEER

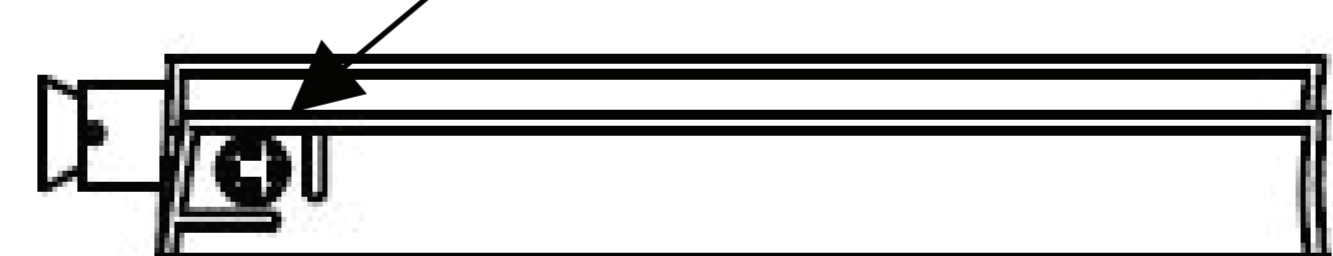

WARM VOOR GEBRUIK IN 2 MINUTEN

*Nota: Start de scopewarmer 5 minuten voordat de scope nodig is.*

*ClearView™ blijft tot een uur warm.  
Dek af met een steriele doek om steriliteit en warmte te behouden.*

CE 0197  
LATEX VRIJ  
DEHP VRIJ  
EENMALIG GEBRUIK  
PRODUCT IS STERIEL TENZIJ VERPAKKING  
GEOPEND OF BESCHADIGD IS

Productie datum: zie opdruk  
Verval datum: 3 jaar na productiedatum  
Normale bewaar condities: niet onder -2°C



MADE IN PRC FOR 2MEDICAL-EUROPE  
Product no. 31SW01

2ME SW2011-05 NL